


Montage- und Bedienungsanleitung

MPB INFUSIONSHALTER WV 18,19, 20, 22, 23, 24, 25

CE
Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0999

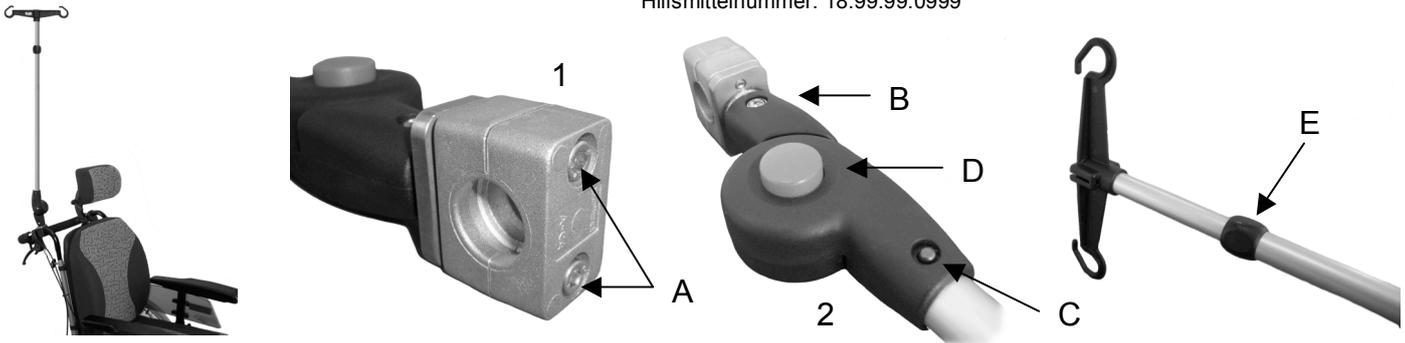

Dieser winkelverstellbare Infusionshalter kann an nahezu jedem Rollstuhl montiert werden.



Auf absolute Kippsicherheit z. B. durch Anti-Kipp-Rollen oder Radstandverlängerung ist bei der Montage zu achten. Maximale Auszugshöhe 195 cm (Türhöhe). Geeignet für Infusionen und enterale Ernährungslösungen in Kunststoffflaschen oder Softpacks bis max. 1000 ml. Alle Gebinde sind gegen Schlenkern zu sichern.

Er besteht aus:

1. dem Flaschenhalter, Kunststoff schwarz
2. der höhenverstellbaren und abnehmbaren Aluminium-Infusionsstange
3. dem verstellbaren Knickgelenk
4. der Halterung mit Befestigungskloben, die für Rohrdurchmesser 18, 19, 20, 22, 23, 24 und 25 mm lieferbar ist.

Montieren Sie zunächst den Befestigungskloben (1) am Schiebegriff oder der Schiebbestange des Rollstuhles. Im Lieferzustand ist die Schelle montiert für Schiebegriffe in Fahrtrichtung (wie bei jedem Faltrollstuhl). Die Montage erfolgt mittels der Inbusschrauben (A) an der Unterseite. Drehen Sie diese Inbusschrauben so fest, dass sich der Halter nicht mehr auf dem Rohr drehen kann.

Handelt es sich um einen Pflegerollstuhl mit querliegender Schiebbestange, so lösen Sie die Schraube mit Mutter (B), drehen das Knickgelenk aus Kunststoff (2) um 90 Grad und setzen danach die Schraube mit Mutter (B) wieder ein.

Soll der Infusionshalter an einem Griffstück montiert werden, dass ca. im 45-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung steht, so lösen Sie ebenfalls die Schraube mit Mutter (B), drehen das Kunststoffgelenk (2) um nur 45 Grad und setzen danach Schraube und Mutter (B) wieder ein.

Durch den Druckknopf (D) in der Lochreihe können Sie die Höhe des Infusionsständers verstellen. Mit der am Ende der Lochreihe befindlichen Klemmverschraubung (E) wird dann die Infusionsstange nochmals gesichert und klapperfrei gehalten. Wird der Infusionshalter einmal nicht benötigt, so kann dieser durch Drücken des Druckknopfes (C) vom Halter entfernt werden.



Aus Sicherheitsgründen muss dann das schwarze Knickgelenk (3) um 180 Grad eingeklappt werden. Konstruktionsbedingt besteht hierbei Klemmgefahr für die Finger.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden Infusionshalters und muss daher aufbewahrt werden. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung erfolgen.



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch