



Waschanleitung

für CorpoLine Kissen mit EPS Mikroperlen Füllung

Gewährleistungsausschluss

1. Waschen und Trocknen der Kissen nur mit sicher geschlossenem Außenbezug oder Wäschesack und nur bis 60°C.
2. Nur Waschmaschinen benutzen, in denen sich das Kissen frei bewegen kann. Das Kissen nicht unter Druck oder Spannung in die Wäschetrommel pressen.
3. Das Austreten der Füllung kann ihre Waschmaschine beschädigen.
4. Der Vertreiber übernimmt keine Gewähr auf Schäden, die auf das Austreten der Füllung zurückzuführen sind.
5. Nur Waschmittel ohne Chlor verwenden (Grosswäschereien!).
6. Zum Desinfizieren der PU- beschichteten Inletts und Bezüge ausschließlich die vom Hersteller zugelassenen Desinfektionsmittel verwenden. Liste umseitig.

Hinweis:

Jodhaltige und zusätzlich eingefärbte Mittel verursachen keinerlei Funktionsminderung, jedoch können diese die PU-Beschichtung, sowie den textilen Träger farblich verändern.

Nicht zu empfehlen sind generell chlorhaltige oder chlorabspaltende Desinfektionsmittel.

ACHTUNG:

- ° Auslaufendes Füllmaterial kann die Atemwege beeinträchtigen.
- ° Das Kissen darf nur mit Außenbezug verwendet werden.
- ° Den inneren Reißverschluss (falls vorhanden) nur zum Auffüllen öffnen.



Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

www.kuhnbieri.ch