





## Badewannen-Einlage

ca. 36 x 92 cm

- 25550 100 weiß
- 25550 101 beige
- 25550 102 blau

### Gebrauchs- und Pflegehinweise

Die Wanne oder Dusche mit klarem Wasser anfeuchten. Die Sauger fest andrücken und Wasser einlaufen lassen. Badezusatz erst dem einlaufenden Wasser zugeben.

#### **Achtung!**

Rutschgefahr, wenn das Badeöl direkt mit der Sicherheitseinlage in Verbindung kommt.

Nach Benutzung mit klarem Wasser abspülen. Zum Trocknen einfach aufhängen.

Zur Beachtung Bei porösem Email kann die Haftfähigkeit nicht gewährleistet werden.



Hochwertiger Soft-Schaum mit Gewebeerstärkung, rutschsicher, pflegeleicht.



v15094 Rev.05/06

Behrend  
home care



## Badewannen-Einlage

ca. 36 x 92 cm

- 25550 100 weiß
- 25550 101 beige
- 25550 102 blau

### Gebrauchs- und Pflegehinweise

Die Wanne oder Dusche mit klarem Wasser anfeuchten. Die Sauger fest andrücken und Wasser einlaufen lassen. Badezusatz erst dem einlaufenden Wasser zugeben.

#### **Achtung!**

Rutschgefahr, wenn das Badeöl direkt mit der Sicherheitseinlage in Verbindung kommt.

Nach Benutzung mit klarem Wasser abspülen. Zum Trocknen einfach aufhängen.

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

Zur Beachtung Bei porösem Email kann die Haftfähigkeit nicht gewährleistet werden.



Hochwertiger Soft-Schaum mit Gewebeerstärkung, rutschsicher, pflegeleicht.



v15094 Rev.05/06

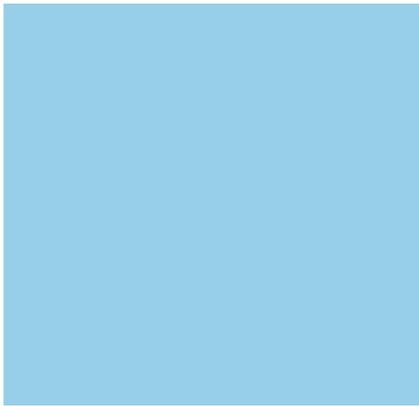

**Kuhn und Bieri AG**

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex  
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Könizstrasse 227, 3097 Liebefeld  
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, [info@kuhnbieri.ch](mailto:info@kuhnbieri.ch)

[www.kuhnbieri.ch](http://www.kuhnbieri.ch)