




## GEBRAUCHSANWEISUNG

---

**200 KG** Duschhocker (mit Teleskop Beine)

---

Die Höhe wie folgt Eingestellt:

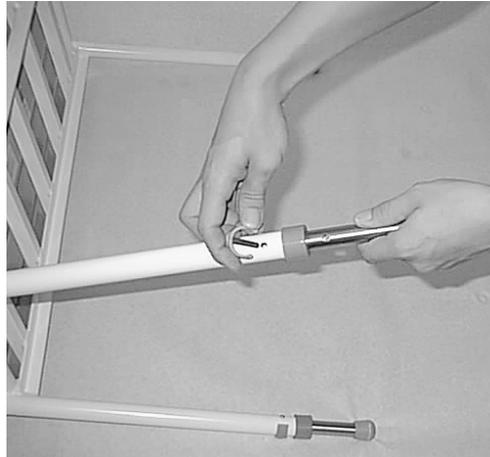

- 1) DUSCHHOCKER HINLEGEN.
  - 2) CLIPS HERAUSNEHMEN, GLEICHZEITIG IM TELESKOPBEIN HALTEN  
BEIN IN DIE GEWÜNSCHTE HÖHE EINSTELLEN  
(VON 3 EINSTELLMÖGLICHKEITEN)
  - 3) CLIPS GANZ DURCHDRÜCKEN.
- GLEICHES VERFAHREN BEI DEN ANDEREN 3 BEINE
- 

BEI SCHRÄGSTELLUNG (WINKEL)DES SITZES

BEINE, WIE OBEN BESCHRIEBEN EINSTELLEN.  
DIE VORDEREN BEINE, IM VERHÄLTNIS ZU DEN HINTEREN BEINEN, IN  
EIN- ODER ZWEI NIEDRIGEREN POSITIONEN ANDERS EINSTELLEN.  
BEI DEN HINTEREN BEINEN, IN HÖCHSTER POSITION, IST DER WINKEL  
7°.

BEI DEN HINTEREN BEINEN IN MITTLERER POSITION UND DIE  
VORDEREN IN NIEDRIGSTER, IST DER WINKEL 3,5°.

<p>Artkl. Nr. 310145 <b>Max. Belastung 200 kg</b> <b>NB! Clips bei Höhenverstellung ganz durchdrücken</b> <b>2 Jahre Reklamations-recht ang. Fabrikationsfehler.</b></p>	<p>Reinigen: Normal vorkommende nicht alkoholische Reinigungsmittel bei Max. 70 Grad</p> <p><b>CE</b></p> <p>18-12-07</p>
--	---

**HMN a/s**

Midtager 22, 2605 Brøndby, Dänemark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92 E-mail [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk)

Webseite [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)



## **Kuhn und Bieri AG**

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex  
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz  
Telefon 0848 102040, Fax 031 970 01 71, [info@kuhnbieri.ch](mailto:info@kuhnbieri.ch)

[www.kuhnbieri.ch](http://www.kuhnbieri.ch)